

ALLES WAT **U**
WILT **WETEN** OVER
DAISY
BOEKEN ≠ **SPELERS**





Wat is DAISY?

Voor mensen met een leesbeperking (visueel beperkten of dyslectici) is het gesproken "Daisyboek" op Cd ontwikkeld. Daisy is de afkorting van **D**igital **A**ccessible **I**nformation **S**ystem.

Het Daisyboek staat op een Daisy-Cd en biedt de lezer een uitgebreide zoekstructuur en een lange afspeeltijd van 30 tot 40 uur. Voor het beluisteren zijn er Daisyspelers en Daisy software ontwikkeld. De Daisystructuur kent vele voordelen. Het navigeren door een boek of document is eenvoudig: er kan op diverse niveaus gebladerd worden, door hoofdstukken, paragrafen, alinea's of paginanummers. Er kunnen bladwijzers worden aangebracht, zodat belangrijke teksten weer gemakkelijk opgezocht kunnen worden. De Daisyspeler onthoudt bovendien waar de lezer gebleven is, ook als er meerdere boeken naast elkaar worden gelezen. Op de Daisyspeler kunnen zowel de voorleessnelheid als toonhoogte zonder kwaliteitsverlies worden ingesteld. Er zijn naast studieboeken ook lectuur, kranten en tijdschriften op Daisy-Cd verkrijgbaar. Naast het voorlezen van Daisyboeken is de Daisyspeler ook in staat audio/muziek en MP3 cd's af te spelen.

Het gebruik van algemene luisterboeken is voor mensen met een leesbeperking ook een alternatief. Maar heeft deze boekvorm dezelfde zoek- en afspeelmogelijkheden als Daisyboeken? Nee, algemene luisterboeken worden normaal gesproken op een Cd-speler afgespeeld en hebben daardoor een beperkte navigatie en afspeelmogelijkheid: deze boeken kennen geen zoekfuncties en hebben geen mogelijkheid tot een vertraagde of versnelde weergave. Als een luisterboek wordt gestopt, dan gaat deze de volgende keer niet verder waar men was gebleven. Als een luisterboek echter in een Daisy speler wordt gestopt kan het voordeel van de Daisyspeler worden benut: wel vertraagde of versnelde weergave en verder gaan waar men was gebleven. De kosten van luisterboeken (kopen in winkel of lenen in de bibliotheek) zijn echter hoger dan die van Daisyboeken (zonder kosten via Loket aangepast lezen).

De populaire E-Readers voor het elektronische boek (E-Book) bieden de lezer een boek in een modern jasje: het LCD leesscherm. Sommige E-Readers kunnen de letters in beperkte mate vergroten. De E-Readers zijn niet voorzien van tekst naar spraaksoftware en bieden op dit moment daarom geen extra ondersteuning voor mensen met een leesbeperking.

Het E-Book kan soms wel voorgelezen worden indien deze met een computer voorzien van spraaksoftware wordt gebruikt. E-Books richten zich voornamelijk op de lectuur, kranten en tijdschriftenmarkt, er zijn geen studieboeken.

Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E-books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler.
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

DAISYSPELER(S)



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- **Welke modellen zijn er?**
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Om een gesproken Daisyboek te kunnen lezen is een Daisyspeler nodig. Hiermee kan door de boekstructuur worden genavigeerd.

Een Daisyboek is op een MP3 speler te beluisteren, echter kan er dan geen gebruik worden gemaakt van de Daisy functies: navigatie- en bladwijzers, aanpassen van snelheid en klankkleur en verder lezen waar je bent gebleven.

Met een Daisyspeler kan uitgebreid via de zoekstructuur in het Daisyboek worden gebladerd naar pagina's, hoofdstukken en paragrafen. Daarnaast is het ook mogelijk de afspeelsnelheid en klankkleur te regelen en bladwijzers (een passage markeren) te plaatsen. Maar bovenal onthoudt de Daisyspeler, tot maximaal 20 boeken, waar u met lezen gestopt bent. Zeer functioneel binnen een studiesituatie waarbij (tegelijkertijd) meerdere boeken gelezen dienen te worden.

Er zijn drie modellen Daisyspelers: het tafelmodel, het draagbare model en de internet speler. De tafelmodellen kenmerken zich vooral door grote en overzichtelijke geplaatste contrasterende navigatie- en afspeeltoetsen, een ingebouwde luidspreker en een eenvoudige Cd-rom lade. Door de eenvoudige bediening en de robuustheid is dit model zeer in trek bij de oudere gebruiker.

De draagbare modellen, ook wel de nieuwe generatie Daisy spelers genoemd, zijn gebaseerd op het formaat van een MP3 speler. Zij werken met een SD geheugenkaart en hebben meer functionaliteiten dan de tafelmodellen. De draagbare modellen zijn voorzien van een memorecorder en tekst-naar-spraak software (voorlezen van tekstbestanden in diverse formaten [txt, xml, html en doc.]). De Daisy Cd-rom moet met een computer of externe Cd-drive worden gekopieerd naar de geheugenkaart. Het voordeel van het werken met een geheugenkaart is de opslagcapaciteit. Meerdere boeken worden op één kaart geplaatst. Hierdoor is er geen gevaar meer dat de originele Daisy Cd-roms beschadigen. Veel jongere gebruikers geven de voorkeur aan de draagbare modellen. Door het formaat en de vormgeving worden deze spelers beter geaccepteerd door scholieren die niet met een 'in het oogspringend' hulpmiddel gezien willen worden.

Vanaf 2011 is het Loket aangepast Lezen gestart met streaming dienstverlening. Hierbij is de Daisyspeler op internet aangesloten. De gebruiker krijgt de boeken niet op Daisy Cd-rom thuisgestuurd, maar ontvangt de boeken direct op de Daisyspeler. Het grote voordeel is de snelle verkrijgbaarheid van het boek of tijdschrift. Met deze techniek kan meer actuele informatie aangeboden worden (bv. een nieuwsdienst of dagelijkse gesproken Telegraaf).



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- **Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.**
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Vergelijking draagbare Daisyspelers



Korte omschrijving

Stream	Plectalk PTP1	Booksense	Classmate
Daisyspeler met eenvoudige bediening, vooral sterk in het afspelen van veel formaten en de organisatie van deze bestanden met de boekenplank. Memo functie en lange batterijduur.	Daisyspeler met zeer uitgebreide opname mogelijkheden voor de gevorderde gebruiker. Door vele functies, moeilijker in gebruik. Memo functie en lange batterijduur.	Daisyspeler met leuke vormgeving en redelijk eenvoudige bediening. Speelt vele bestandsformaten af. Stereo opnemen en afspelen. Geeft datum en tijd weer. Memo functie en lange batterijduur.	Daisyspeler en voorleesapparaat met touchscreen. Tekst documenten worden voorgelezen en op het scherm getoond met een highlight.

Afmeting en gewicht

11,7 x 6,6 x 2,2 cm 180 gram	11,2 x 5,5 x 1,6 cm 110 gram	10,8 x 4,7 x 1,8 cm 111 gram	8,8 x 15,5 x 2,5 cm 300 gram
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

SD kaart capaciteit en externe media

Incl. 2GB kaart SD (tot 32 GB mogelijk). USB stick aan te sluiten.	Incl. 2GB kaart SD (tot 32 GB mogelijk). USB stick aan te sluiten.	Incl. 2GB kaart SD (tot 32 GB mogelijk). USB stick aan te sluiten.	Incl. 2GB kaart SD (tot 32 GB mogelijk). USB stick aan te sluiten.
--	--	--	--

Batterijspeelduur en oplaadtijd

Speeltijd 15 uur Laadtijd 4 uur	Speeltijd 10 uur Laadtijd 4 uur	Speeltijd 12 uur Laadtijd 2,5 uur	Speeltijd 7 uur Laadtijd 4 uur
------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	-----------------------------------

Bestandsformaten af te spelen met spraaksynthese

TXT, HTML, XML, BRF, RTF. Nederlandse en Engelse stem	TXT, HTML, DOC Nederlandse en Engelse stem	TXT, HTML, XML, RTF, DOC, DOCX Nederlandse en Engelse stem	TXT, HTML, XML, RTF. Nederlandse en Engelse stem
--	---	---	---

Afspelbare geluidsbestand formaten

MP3, WAV, WMA (windows media player)	MP3, WMA (windows media player)	MP3, WAV, WMA (windows media player)	MP3, WAV, WMA (windows media player)
--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------------

Handleiding

1 x intern, dmv spraaksynthese Volledige en verkorte handleiding op Optelec website Tekstbestand op CD meegeleverd	1 x intern, dmv spraaksynthese 1x verkorte handleiding van leverancier Volledige en verkorte handleiding op Optelec website	1 x intern, dmv spraaksynthese Volledige en verkorte handleiding op Optelec website	1 x intern, dmv spraaksynthese Volledige handleiding op Optelec website Tekstbestand op CD meegeleverd
--	---	--	--



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- **Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.**
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: de van de computer een Daisyspeler.
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler-aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Vergelijking tafel model Daisyspelers



Korte omschrijving

Victor Reader Stratus 4	Victor Reader Stratus 12	Plextalk PTN2	Plextalk PTX1
Tafel model, met overzichtelijke bediening en handvat. Goed contrast. Speler is voorzien van een luidspreker en oplaadbare accu. Geleverd met een afdekkap om de meeste toetsen af te dekken.	Verschil met de Stratus 4 is het numeriek toetsenbord voor uitgebreidere navigatie. Bij dit model wordt geen afdekkap geleverd.	Tafelmodel met een numeriek toetsenbord voor uitgebreide boeknavigatie mogelijk. Deze extra toetsen zijn af te schermen met de bijgeleverde kap. Interne luidspreker en oplaadbare accu.	Uiterlijk is deze speler gelijk aan de PTN2. Deze speler heeft als extra de mogelijkheid om deze op internet aan te sluiten om naast het afspelen van boeken op CD ook direct boeken te kunnen lezen die via internet in de speler worden gezet.

Afmeting en gewicht

22 x 21,6 x 4,8 cm 950 gram	22 x 21,6 x 4,8 cm 950 gram	17,2 x 22 x 5,6 cm 1200 gram	17,2 x 22 x 5,6 cm 1200 gram
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

CD/ SD kaart capaciteit en externe media

Daisy Cd-rom Muziek Cd-rom	Daisy Cd-rom Muziek Cd-rom	Daisy Cd-rom Muziek Cd-rom SD kaart met capaciteit tot 32 GB, USB stick aan te sluiten	Daisy Cd-rom Muziek Cd-rom SD kaart met capaciteit tot 32 GB, USB stick aan te sluiten
-------------------------------	-------------------------------	--	--

Batterijspeelduur en oplaadtijd

Speeltijd 10 uur Laadtijd 4 uur	Speeltijd 10 uur Laadtijd 4 uur	Speeltijd 5 uur Laadtijd 4 uur	Speeltijd 5 uur Laadtijd 4 uur
------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Bestandsformaten af te spelen met spraaksynthese

Nvt	Nvt	Txt, HTML	Txt, HTML
-----	-----	-----------	-----------

Aantal (synthetische) tekst naar spraak stemmen

Nvt	Nvt	Nederlands	Nederlands
-----	-----	------------	------------

Handleiding

Verkorte op papier en volledige op Daisy CD bij speler	Verkorte op papier en volledige op Daisy CD bij speler	Verkorte handleiding op papier met speler geleverd. Volledige op Daisy in speler	Verkorte handleiding op papier met speler geleverd. Volledige op Daisy in speler
Volledige handleiding in Word op website	Volledige handleiding in Word op website	Volledige handleiding in Word op website	Volledige handleiding in Word op website



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- **Daisyspeler overzicht van de internet spelers.**
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: de van de computer een Daisyspeler.
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler-aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Internet Daisyspelers

Introductie

De Daisy CD was de opvolger van het gesproken boek op cassette. Nu, 7 jaar na de introductie van de Daisy CD, zijn er weer nieuwe ontwikkelingen. De 'nieuwe generatie' Daisyspeler kan op internet aangesloten worden. De boeken komen dan niet meer via de post maar zijn direct beschikbaar als u de internet Daisyspeler aanzet. Deze techniek heet 'Streaming'.

Op deze manier kunt u snel beschikken over het belangrijkste deel van het boeken, kranten en tijdschriften aanbod van het Loket aangepast-lezen.

Wat zijn de voordelen?

Wanneer u Daisylectuur bij het Loket aangepast-lezen bestelt, is dit direct beschikbaar om te lezen. U hoeft niet 1 of 2 dagen te wachten op de post. Terugsturen hoeft ook niet meer.

Internet aansluiting

Om gebruik te maken van deze dienst heeft u een internet aansluiting nodig. Heeft u nog geen internet aansluiting, dan heeft Optelec daar een oplossing voor.

Wat is de Orion Webbox?

De Orion Webbox is een nieuwe technologische ontwikkeling, die het 'lezen' van informatie, zoals het gesproken (Daisy) boek op een andere manier mogelijk maakt. Daarvoor is geen Daisy-speler nodig en geen Daisy CD's, maar een Orion Webbox met een internet verbinding. Zo kunt u direct over actueel nieuws beschikken zonder te moeten wachten op verstuurd Daisy CD's. Daarnaast biedt de Webbox nog meer informatie diensten.



Voor wie?

Voor wie direct en laagdrempelig over actuele informatie wil beschikken is de Orion Webbox dé oplossing. Gebruikers van de diensten van het Loket Aangepast lezen kunnen de boeken en tijdschriften op de Orion Webbox ontvangen, in plaats van wachten op een CD. Maar door de uitgebreide andere informatie die via de Orion Webbox beschikbaar is, is actuele informatie zoals het laatste nieuws, direct beschikbaar.



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- **Wat kosten de Daisyspelers?**
- **Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?**
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: de computer als Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Wat kosten de Daisyspelers?

De Daisyspelers zijn te koop vanaf € 349,-. Een volledig overzicht van de spelers en actuele prijzen, staat op www.optelec.nl, onder het menu Producten / Daisy spelers, tabblad vergoeding/bestellen. Voor bestellingen: www.shoptelec.nl.

Worden Daisyspelers vergoed?

Daisyspelers kunnen, voor mensen met een visuele- en motorische beperking en uitbehandelde dyslexie, onder bepaalde voorwaarden door de zorgverzekeraar vergoed worden. Er moet een aanvraag met een aantal documenten ingediend worden bij Optelec. In het stappenplan aan het eind van dit document staan de procedure, voorwaarden van de zorgverzekeraar en de benodigde documenten benoemd.

Wanneer de Daisyspeler in verband met dyslexie wordt aangevraagd, dient uw aanvraag vergezeld te gaan van een Dyslexieverklaring en een Verklaring van Uitbehandeling via een multidisciplinair zorgcentrum (een centrum waarbij meerdere behandelaars zoals bijvoorbeeld een arts, docent, GZ-psycholoog en/of orthopedagoog aangesloten is). In de Zorgverzekeringswet is bepaald dat de vergoeding voor een Daisyspeler alleen wordt verleend als de behandeling niet succesvol is gebleken. Alleen een dyslexieverklaring en een behandeling door een remedial teacher van school, wordt door de zorgverzekeraar niet geaccepteerd.

Arbeidsgehandicapten die de Daisyspeler nodig hebben voor het volgen van onderwijs of het uitvoeren van werk kunnen op grond van de Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten (WIA), de aanvraag bij het UWV van de woonplaats indienen.

Neem vrijblijvend contact met Optelec op, indien u zich wilt laten informeren over de mogelijkheid tot vergoeding van de Daisyspeler. Als leverancier voor alle zorgverzekeraars en gecontracteerd leverancier voor het UWV kan Optelec de behandeling van uw aanvraag verzorgen.

Wanneer de zorgverzekeraar uw verzoek niet honoreert biedt de overheid u vanaf 2009 de mogelijkheid om via uw aangifte inkomstenbelasting een vaste belasting aftrekpost "specifieke zorgkosten" voor chronische (dyslexie) aandoeningen op te voeren.

Wilt u de Daisyspeler particulier kopen, dan kunt u dat doen in de webshop: www.shoptelec.nl



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmogeliken.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- **Handleidingen..**
- **Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?**

Daisyboeken bestellen:

- **Hoe kan ik Daisyboeken voor thuis bestellen?**
- **Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?**
- **Wat zijn de kosten?**
- **Worden Daisyboeken vergoed?**

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Handleidingen

Naast de uitgebreide handleidingen zijn er verkorte handleidingen beschikbaar. Omdat bij dyslexie minder functies worden gebruikt is daarvoor ook een specifieke verkorte handleiding beschikbaar op de website, onder het menu Daisyspelers.

Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyspelers kunnen bekeken en geleend worden bij de uitleenservice van de Makkelijk Lezen Pleinen in de Openbare Bibliotheek. Bekeken worden bij de Regionale Centra van Visio en Sensis.

Optelec heeft twee showrooms, in Barendrecht en Arnhem, waar een uitgebreide uitleg kan worden gegeven. Wanneer een Daisyspeler particulier wordt gekocht, kan deze binnen 10 werkdagen teruggegeven worden. Zie voor de voorwaarden www.optelec.nl

DAISYBOEKEN BESTELLEN

Het aanbod Daisyboeken kent een grote diversiteit: romans, spannende-, informatieve- en jeugdboeken, tijdschriften, kranten en studie- en vakmateriaal.

Daisyboeken bestellen voor thuis

Er zijn ruim 60.000 titels en jaarlijks komen er 1500 titels bij. Er is een kennismakingscollectie Daisyboeken te leen bij de Openbare Bibliotheek. De gehele collectie boeken, kranten en tijdschriften wordt uitgeleend door een centrale organisatie: Loket aangepast lezen. De Daisyboeken worden met de post verstuurd. Voor boeken is er een vrijwillige bijdrage. Voor kranten en tijdschriften wordt wel een vergoeding gevraagd. Kijk op www.aangepast-lezen.nl voor alle informatie. De kosten voor Daisylectuur worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Deze dienstverlening is voor mensen met een visuele beperking of andere leesbeperking (bv. afasie).

Daisyboeken bestellen voor op school

De bestaande Daisy studie- en vakliteratuur bestaat uit ongeveer 80% van de populaire methoden in het primair- en voortgezet onderwijs. Titels worden ook op verzoek gemaakt.

Naast de Daisy boeken produceert Dedicon ook een digitale tekstcollectie. Deze "Foto-PDF", "KES Plus" (specifiek voor Kurzweil software), "Edu" en "Edu Eenvoudig" tekstbestanden zijn ondermeer te lezen met behulp van de computer programma's Kurzweil 3000, Sprint, EasyTutor en ClaroRead.



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- **Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?**
- **Wat betekent Daisy voor het leerproces?**
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: de computer als Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Dedicon ontvangt voor het aanpassen/inspreken van de schoolmaterialen een subsidie van het Ministerie van OCW. Dedicon hanteert slechts een beperkte bijdrage voor reproductie-, handling- en verzendkosten. Er wordt een bijdrage van € 4,50 per boek, per leesvorm, per leerling, per schooljaar in rekening gebracht. Deze kosten vallen in de gratis vergoeding van schoolboeken en worden voor de leerling door school op naam besteld. Voor vragen over deze vergoeding verwijzen wij u naar de website van OCW, www.gratisschoolboeken.nl.

Meer informatie over Dedicon, het lidmaatschap, en de bestelprocedure: <http://educatief.dedicon.nl>

DAISY GEBRUIKEN OP SCHOOL

De Daisyspeler is een praktisch en eenvoudig alternatief voor het werken met een computer. De Daisyspeler wordt gebruikt voor het tegelijk beluisteren en meelezen. Het actief meelezen tijdens het luisteren verhoogt de leessnelheid, het concentratievermogen en het tekstbegrip van de leerling. In de lesomgeving kan de leerling door middel van één oortje de tekst beluisteren terwijl er zelf meegelezen wordt. Het gebruik van beide oortjes wordt ontraden; het sluit de leerling tijdens het lezen volledig af van de lesomgeving.

De draagbare Daisyspelers zijn voorzien van tekst naar spraaksoftware. Hierdoor kunnen diverse formaten tekstbestanden voorgelezen worden. Dit biedt de leerling de mogelijkheid zijn eigen geschreven werkstuk of een document van een docent (.doc, .txt, .xml, .html) te beluisteren.

Het werken met de Daisyspeler geeft de leerling met een taalachterstand een gericht moment van lees- en luisteraandacht. Het verlaagt diens behoefte aan extra voorleestijd van de leerkracht. Daarnaast verhoogt het de zelfstandigheid met betrekking tot de indeling van de studietijd.

Tom Braams, onderwijspsycholoog en schrijver van o.a. "Kinderen met Dyslexie" en "Dyslexie een complex taalprobleem" schrijft hierover het volgende:

"Door hulpmiddelen te gebruiken kunnen kinderen beter meedoen met hun klas en lopen ze geen onnodige achterstanden op, met vakken waarbij ze veel moeten lezen. Het is natuurlijk het beste om kinderen het lezen en schrijven zo goed te leren, dat ze geen hulpmiddelen nodig hebben. Aan de andere kant kan het niet mogen gebruiken van hulpmiddelen tot grote ellende leiden. Het kan leerlingen afremmen in hun ontwikkeling en veel frustraties geven. Het is weliswaar zo dat je van je fouten kunt leren,



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- **Daisy tijdens het examen.**

Daisy software

- EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

maar van veel frustraties leer je niet: dat leidt alleen tot verlies van motivatie.

De laatste jaren wordt steeds duidelijker dat vrijwel alle dyslectici veel steun hebben aan hulpmiddelen. Kinderen op de basisschool en voortgezet onderwijs kunnen beter meedoen en raken minder achter als ze schoolboeken op Daisy Cd-rom gebruiken. Leesdeskundigen stimuleren het gebruik van Daisy spelers al vanaf groep 4 en 5.

Het gebruik van leeshulpmiddelen leidt er toe dat kinderen meer (mee)lezen en daardoor *beter* vooruitgaan met lezen. Hulpmiddelen maken zeker niet lui, integendeel de kinderen gaan er veel meer door lezen! Ook studenten op het hbo of universiteit kunnen bijvoorbeeld veel baat hebben van tekst naar spraak software."

Daisy gebruiken tijdens examens

Daisy mag gebruikt worden tijdens examens, zie hiervoor het officiële Examenbesluit art. 55 (afwijking wijze van examineren):

Voor kandidaten die o.g.v. het deskundigenrapport recht hebben op auditieve ondersteuning, is op bestelling een Daisy Cd-rom met ingesproken tekst beschikbaar, of een pdf (tekstbestand) voor audio middels spraaksynthese (kunstmatige stem). De Daisy is alleen beschikbaar voor het eerste tijdvak. Als een kandidaat recht heeft op auditieve ondersteuning, geldt dat voor eerste en tweede tijdvak en moet de school in het tweede tijdvak zelf een voorziening treffen. Overigens geldt het recht op audio dan ook voor het schoolexamen; ook daar moet de school dan een met de ingesproken tekst gelijkwaardige voorziening hebben getroffen. Daisy en pdf worden geleverd voor alle examens met papier, ook voor de examens kunst (beeldend/ dans/ drama/ muziek/ algemeen) in Authorware en voor de complex-examens. De pdf of Daisy betreft dan uitsluitend het papieren deel (dat bij deze examens het meeste leeswerk bevat).

Sinds het centraal examen 2007 worden de examens geleverd in een grotere letter (punt 11) en voor havo en vwo in een ander lettertype dan voorheen. Waar voorheen dyslectische kandidaten grootschrift nodig hadden, is dat door de grotere letter en het andere lettertype voor een deel van de kandidaten niet meer nodig. Scholen worden dringend verzocht, met de kandidaten aan de hand van het examen 2007, 2008 of 2009 na te gaan of vergroting nodig is, en alleen zelf te vergroten indien nodig. Als les- en toetsmateriaal voorafgaand aan het centraal examen in letter punt 11 was, is er geen reden om tot vergroting over te gaan. Als de dyslectische kandidaat zijn examen maakt aan de computer, kan hem ook in plaats van een papieren vergroting de digitale PDF worden aangeboden. Daarbij kan hij steeds op maat en naar wens vergroten.



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- **EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler**
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

Bij alle schriftelijke examens is de computer toegestaan als schrijfgerei. De school kan dat toestaan voor alle kandidaten, kan het ook toestaan voor speciale groepen kandidaten bijvoorbeeld de dyslectische kandidaten.

Als de computer als schrijfgerei wordt gebruikt, is het van belang dat kandidaten geen toegang hebben tot verboden hulpmiddelen (zoals een digitale atlas of een digitaal woordenboek), en moet ook o.m.

de opslag (bijvoorbeeld uitprinten) worden geregeld. Op www.cevo.nl staan aanwijzingen voor scholen die de computer als schrijfgerei willen inzetten.

Extra Cito faciliteiten voor dyslectische leerlingen in het primaire onderwijs.

Bij een leerling waar aan de hand van een psychologisch onderzoek is vastgesteld dat er sprake is van dyslexie, is recht op de volgende faciliteiten:

- De tekst vergroot op papier en/ of ingesproken op Cd-rom aanbieden, deze kunnen door school bij Cito besteld worden
- De leerling krijgt meer tijd. De leerkracht mag zelf bepalen hoeveel extra tijd, om zo het kind in staat te stellen de toetsen op eigen tempo af te maken. Deze mogelijkheid verschilt per basisschool.

Tips voor de school

- Leerling, ouder, docent of begeleider vragen bij de directeur toestemming voor verlenging van de tijd en het gebruik van een hulpmiddel tijdens het examen.
- Dit verzoek gaat vergezeld van een deskundigen verklaring, waarin ook is uitgelegd dat het hulpmiddel aansluit bij de begeleidingsadviezen.
- De directeur maakt bij de inspectie melding van een verleende toestemming.

DAISY SOFTWARE

Om Daisyboeken op uw computer af te spelen/te beluisteren heeft u speciale software nodig. Deze Daisyspeler software kunt u betaald (EasyReader) of als de gratis download (Amis) verkrijgen. Kijk op www.optelec.nl onder het menu Daisyspeler. In het linker menu staat Daisy software.

EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler. EasyReader is voorleessoftware die Daisy bestanden voorleest op de computer. Wanneer het Daisy bestand bestaat uit spraak en tekst dan laat het EasyReader programma ook de tekst op het scherm zien. Zo wordt de tekst niet alleen voorgelezen maar kan ook meegelezen worden. EasyReader



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspeler(s):

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen en tips.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- **EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler**
- **EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.**
- **Gratis software uitproberen!**
- **Wordt Daisy software vergoed?**

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag. via

biedt naast de basisfuncties van een Daisy speler, ook de mogelijkheid om, bij bepaalde tekstpassages, zelf tekst- of gesproken notities te maken.

In het onderwijs kan EasyReader worden gebruikt in combinatie met EasyProducer (zelf Daisy tekstbestanden maken). De bestaande Daisy Cd-roms van Dedicon zijn niet voorzien van gecombineerde tekst en spraak maar alleen voorzien van audio (spraak) bestanden.

EasyProducer: zelf Daisy tekstbestanden maken.

Wilt u met behulp van de computer Daisy documenten en boeken maken dan kan dat met EasyProducer software. In vier eenvoudige stappen creëert u uw eigen Daisyboek: Microsoft Word bestanden worden met EasyProducer omgezet naar een, met een computerstem, gesproken Daisy tekstbestand met navigatie. Het zelfgemaakte Daisy bestand kan vervolgens op Cd-rom, USB of SD kaart worden gezet zodat deze kan worden beluisterd met de Daisyspeler of op de computer. EasyReader Daisyspeler software wordt als onderdeel van het EasyProducer softwarepakket geleverd.

Gratis de Dyslexie softwarepakketten uitproberen!

Via de website van Optelec kunt u alle dyslexie software als demonstratiepakket gratis downloaden.

Wordt Daisy software vergoed?

Nee, maar in februari 2008 heeft de Staatssecretaris besloten dat gespecialiseerde dyslexie software volledig aftrekbaar is als buitengewone uitgave. Het besluit is gebaseerd op de onderstaande criteria:

- Dyslexie wordt in het algemeen aangemerkt als een vorm van invaliditeit.
- Het softwarepakket kan worden aangemerkt als hulpmiddel; het lijkt specifiek te zijn samengesteld voor de doelgroep dyslexiepatiënten. Het aanschaffen van een dergelijk software pakket zonder medisch advies of zonder medische begeleiding zal uitsluitend worden gedaan door of ten behoeve van mensen met een dyslexieprobleem.
- Gezien de problemen die dyslexie veroorzaakt, lijkt het aannemelijk dat een belastingplichtige zich redelijkerwijs gedwongen kan voelen de uitgave te doen.

Raadpleeg de belastingdienst of uw belastingadviseur omtrent de hoogte van deze vergoeding.



Wat is "Daisy"?

- Wat betekent Daisy?
- Wat is speciaal aan Daisy?
- Wat is het verschil tussen de diverse leesvormen: Daisy-, luister- en E- books?

Daisyspelers:

- Welke modellen zijn er?
- Daisyspeler overzicht van de draagbare modellen.
- Daisyspeler overzicht van de tafelmodellen.
- Daisyspeler overzicht van de internet spelers.
- Wat kosten de Daisyspelers?
- Worden Daisyspelers door de zorgverzekeraars vergoed?
- Handleidingen.
- Waar kunt u een Daisyspeler uitproberen?

Daisyboeken bestellen:

- Hoe kan ik Daisyboeken voor privé bestellen?
- Hoe kan ik Daisyboeken voor school bestellen?
- Wat zijn de kosten?
- Worden Daisyboeken vergoed?

Daisy gebruiken op school

- Hoe kan ik Daisy gebruiken als student?
- Wat betekent Daisy voor het leerproces?
- Daisy tijdens het examen.

Daisy software

- EasyReader: maak van de computer een Daisyspeler
- EasyProducer: zelf Daisyboeken maken.
- Gratis software uitproberen!
- Wordt Daisy software vergoed?

Daisyspeler stappenplan: uw aanvraag via zorgverzekering

- Invullen aanvraagformulier.
- Verzamelen verklaringen.
- Formulieren toesturen.

Adresgegevens Optelec

Invulblad stappenplan voor een Daisyspeler aanvraag, via Optelec, bij uw zorgverzekeraar

DAISY STAPPENPLAN

Alle zorgverzekeraars stellen een aantal voorwaarden voor het aanvragen van de vergoeding voor een Daisyspeler. Een aanvraag wordt alleen goedgekeurd, wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan en alle benodigde documenten zijn toegevoegd. Raadpleeg de website; onder het menu-item Daisyspeler staat een overzicht van de voorwaarde per zorgverzekeraar.

Om uw vergoedingsaanvraag zo vlot mogelijk te laten verlopen, moeten de volgende stappen worden doorlopen:

1) Vul het Daisyspeler aanvraag/bestelformulier in. Neem contact op met Optelec voor eventuele hulp bij de modelkeuze: 088-6783513 of kijk op de website.

2) Mee te sturen documenten

2a Visuele of motorische handicap

De Daisyspeler dient voorgeschreven te zijn door een behandelend (oog/huis) arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartiméus. U dient een medisch rapport van de behandelend (oog/huis) arts te overleggen waarin de oogaandoening, restvisus en de Daisyspeler als adequaat hulpmiddel genoemd wordt.

2b Dyslexie

Verzamel de benodigde verklaringen:

- een **dyslexieverklaring** waarin een GZ-psycholoog of orthopedagoog verklaart dat er sprake is van dyslexie.
- een **verklaring van uitbehandeling*** door een GZ-psycholoog of orthopedagoog vanuit een Multi disciplinair zorgcentrum.

* In de verklaring van uitbehandeling dient te staan dat de behandeling is gestaakt wegens onvoldoende vooruitgang en dat de Daisy speler wordt aangeraden als een zinvol hulp middel, voor de thuissituatie. De Daisyspeler wordt alleen voor het thuisgebruik vergoed. Voor gebruik van een Daisy- speler op school wordt geen vergoeding gegeven.

3) Stuur het aanvraagformulier en de benodigde documenten op naar Optelec.

Optelec Nederland BV

Antwoordnummer 2053
2990 WC Barendrecht
Tel. 088-6783555
Fax 088-6783500

Website: www.optelec.nl
webshop: www.shoptelec.nl

Optelec aanvraag/bestelformulier voor vergoeding van de Daisyspeler door de zorgverzekeraar

Dit aanvraagformulier kunt u faxen naar 088-6783500 of in een ongefrankeerde enveloppe sturen aan:

Optelec Nederland BV
Antwoordnummer 2053
2990 WC Barendrecht

Let op! Vul gegevens in van de eindgebruiker!

Naam en Voornaam		M / V
Geboortedatum		
Straat en huisnummer		
Postcode en Plaats		
Telefoonnummer		Mobiel:
Emailadres		Nieuwsbrief : Ja / Nee
Zorgverzekeraar		
Polisnummer		Bsn nummer:

Betreft het hier een eerste Daisyspeler aanvraag:	<input type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nee	→ Leveringsjaar:
---	-----------------------------	------------------------------	------------------

Mee te sturen documenten voor de Daisyspeler aanvraag bij een visuele beperking

<input type="checkbox"/>	Visuele beperking: medisch rapport van een behandelend (oog/huis) arts of een regionale instelling zoals Koninklijke Visio of Bartiméus. Met begeleidend schrijven waarin oogaandoening, restvisus en de Daisyspeler als adequaat hulpmiddel genoemd wordt.
--------------------------	---

Mee te sturen documenten voor de Daisyspeler aanvraag bij een motorische beperking







<input type="checkbox"/>	Motorische beperking: medisch rapport van een behandelend arts. Met begeleidend schrijven waarin de Daisyspeler als adequaat hulpmiddel genoemd wordt.
--------------------------	--

Mee te sturen documenten voor de Daisyspeler aanvraag bij Dyslexie

<input type="checkbox"/>	Dyslexieverklaring afgegeven door een GZ-psycholoog of orthopedagoog.
<input type="checkbox"/>	Verklaring van uitbehandeling afgegeven door een Multi disciplinair zorgcentrum waaruit blijkt dat de behandeling is gestaakt omdat er geen verdere vooruitgang meer te verwachten is.

Aanvraag via:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		Vestiging:	Behandelaar
---------------	--------------------------	---	--------------------------	---	------------	-------------

Uw Daisyspeler keuze:

								
Stream	PTP1	BookSense	Classmate	Stratus 4	Stratus 12	PTN2	PTX1	Webbox
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee	<p>Als de aanvraag door mijn zorgverzekeraar wordt afgekeurd, wil ik de Daisyspeler zelf aanschaffen en machtig ik Optelec het bedrag, éénmalig van mijn bankrekening af te schrijven.</p>	Bankrekeningnummer: <hr/> Handtekening:
---	---	--